

Mercury Advance SMARTcare®

Matelas hybride motorisable



**Une véritable révolution
dans le parcours de soin**

Redistribution et immersion pour prendre
en charge les patients les plus à risque



Double thérapie pour 1 support

Matelas en mousse hybride mousse-air pour les patients jusqu'à 254 kg

Intelligent
Pressure Care
Management



Indications thérapeutiques

- > Prévention : Risque Moyen à Très élevé
- > Patient alité plus de 10 heures, qui se mobilise seul avec difficulté, sans artériopathie.
- > Aide au traitement d'escarre(s) jusqu'au stade 4 associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

Double thérapie sur une seule surface

- > Une surface 2-en-1 qui passe du mode statique au mode dynamique lorsque cela est cliniquement nécessaire, puis revient au mode statique sans délai, sans intervention supplémentaire et sans transfert du patient.
- > En mode non motorisé, une technologie avancée de déplacement d'air optimise en permanence la redistribution de la pression en fonction du poids et des mouvements du patient ; la structure unique « mousse dans une alvéole d'air » assure une thérapie efficace en mode motorisé.
- > La répartition de la pression est 20 % meilleure que celle d'un matelas en mousse haut de gamme, et il est conçu pour les patients à très haut risque, avec une capacité de charge allant jusqu'à 254 kg.


Matelas 4 zones

- > Une zone de tête fixe composée uniquement de mousse, avec trois petites cellules alvéolées en mousse et en air soutenant le haut du dos et les épaules.
- > Sept grandes alvéoles en mousse et en air à structure crénelée assurent un soutien au niveau du tronc, du sacrum, des cuisses et des jambes.
- > Une zone talon 100% AIR à basse pression, avec 5 cellules interconnectées, et un système U-Core breveté spécialement conçu pour maintenir les talons en suspension, soulageant ainsi cette zone particulièrement vulnérable.

Ergonomie et sécurité

- > Compresseur très silencieux et sans vibration facile à utiliser qui ajuste automatiquement la pression en fonction du poids du patient, avec un
- > Réglage confort pour s'adapter au confort de chaque patient et améliorer la qualité du sommeil.
- > La languette de dégonflage rapide CPR permet un dégonflage en moins de 10 secondes, tandis qu'une LED clignotante alerte le soignant en cas de pression insuffisante dans les cellules ou de défaillance du système.
- > La housse multi-extensible, perméable à la vapeur et soudée par haute fréquence, dotée d'une protection par rabat à fermeture éclair 3 côtés, répond aux normes les plus strictes en matière de contrôle des infections.

Mercury Advance SMARTcare® combine les technologies de soins de pression les plus innovantes et cliniquement prouvées en une seule surface de soutien.

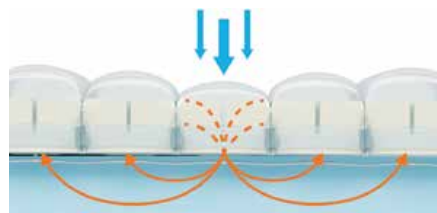

UNE REDISTRIBUTION DE LA PRESSION PLUS EFFICACE OPTIMISÉE EN PERMANENCE

- > Mousse CME de haute qualité et construction à cellules d'air
- > La technologie avancée de déplacement d'air optimise en permanence la redistribution de la pression en fonction du poids et des mouvements du patient.
- > La zone du talon "Air only" décharge efficacement la pression sur cette zone vulnérable.




THÉRAPIE EFFICACE DE SOULAGEMENT DE LA PRESSION

- > Il suffit d'ajouter une unité d'alimentation pour obtenir une fonction alternée
- > Construction unique "mousse dans cellule d'air" pour une diffusion plus efficace de la thérapie
- > Cycle alternatif de 10 minutes, 2 en 1
- > Choix du réglage LO ou HI

Nouvelle approche dans la gestion des soins

Mercury Advance SMARTcare® est cliniquement prouvé pour soutenir la prévention et le traitement des escarres. En réduisant le nombre d'étapes et le temps nécessaire pour placer les patients sur la bonne surface d'appui, Mercury Advance SMARTcare® représente un changement radical dans la prestation des soins et constitue une solution plus rentable, favorisant

une utilisation optimale des ressources. Mercury Advance SMARTcare® peut facilement passer du mode statique au mode dynamique, et redescendre lorsque cela est jugé cliniquement approprié, sans retard, sans administration associée et sans exigences de déplacement et de manutention pour le transfert du patient.

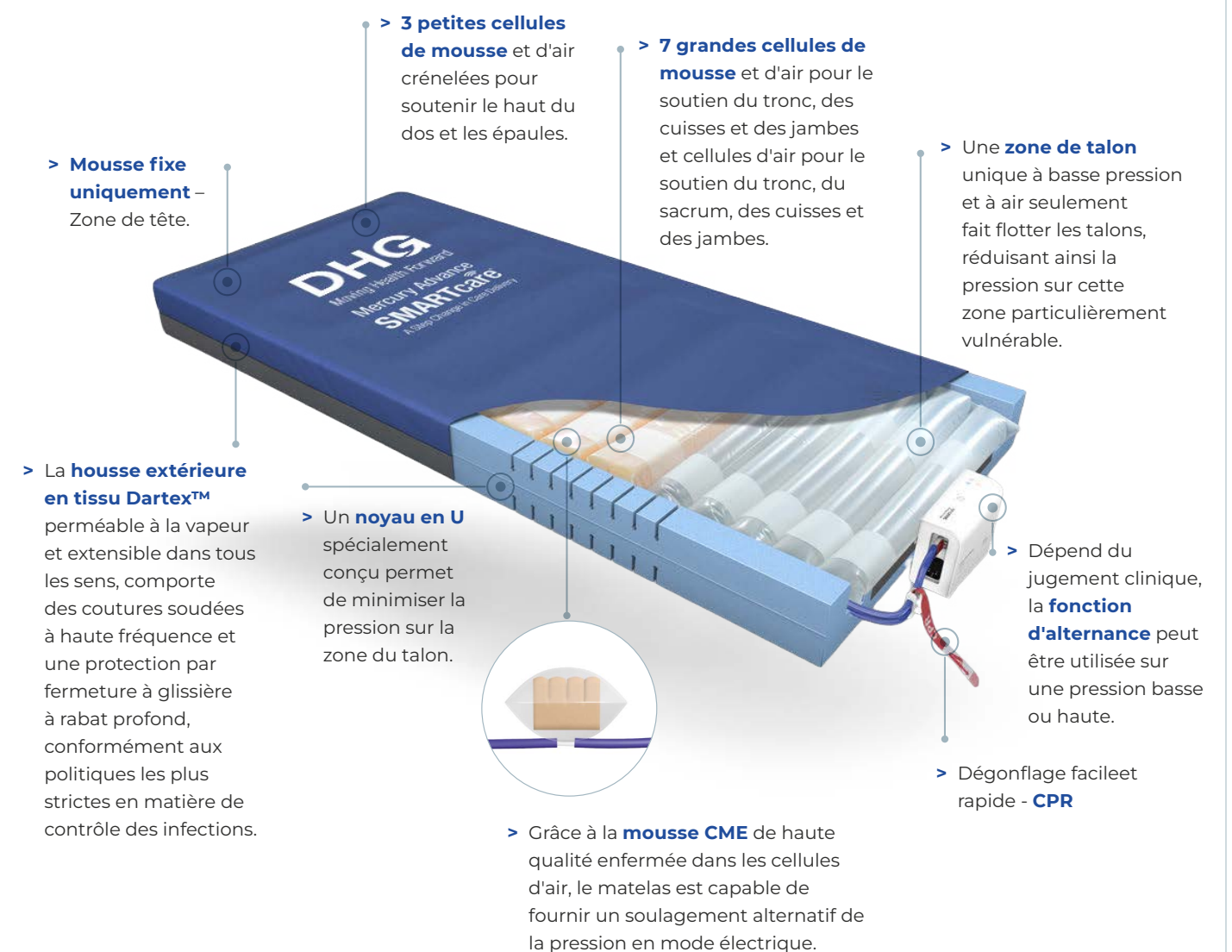

Lorsqu'il est utilisé en mode non motorisé, la technologie avancée de déplacement d'air, éprouvée cliniquement, optimise en permanence la redistribution de la pression en fonction du poids et des mouvements du patient. Lorsqu'il est utilisé en mode motorisé, Mercury Advance SMARTcare® soulage la pression grâce à une série de cellules de mousse et d'air connectées en alternance. Sans être encombrée par une couche supérieure de mousse sur le matelas, la construction unique "mousse dans cellule d'air" assure la délivrance d'une thérapie efficace de soulagement de la pression.

Technical data ▼

							
	Hauteur ▼	Largeur ▼	Longueur ▼	Poids maximal de l'utilisateur ▼	Poids total ▼	Mousse HR ▼	Garantie ▼
Matelas	15 cm	88 cm	198 cm	Pas de limite de poids minimum. Produit évalué à Capacité de 254 kg	Matelas de 13,3 kg 1,7 kg pour le compresseur	Bleu 38–40kg/m ³ Portance Ferme – 200 Newtons Rose 38–40kg/m ³ Portance souple – 120 Newtons	2 ans
	Durée du cycle ▼	Tension ▼	Consommation électrique ▼	Classification ▼			
Compresseur	10 minutes	220V – 240V / 50HZ	10W	Ila			

Conforme aux normes : BS EN 597-1 (cigarette), BS EN 597-2 (allumette) et BS 7177 (source d'inflammation 5)

Les soins infirmiers essentiels jouent un rôle central dans la prise en charge des escarres. Ce matelas peut contribuer positivement à la réussite d'un plan de prévention des escarres comprenant une formation, un jugement clinique et un plan d'action basé sur la vulnérabilité, qui sont des facteurs fondamentaux dans la prévention des escarres. Diverses échelles d'évaluation peuvent être utilisées comme méthode formelle d'évaluation du risque de développement d'escarres, et doit être utilisée en complément d'une évaluation informelle (jugement infirmier éclairé) dans le cadre d'un plan global et individualisé.

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@dhcare.com
www.dhcare.fr

DHCare France SAS
 Route de Saint Roch
 37230 Fondettes
 France

